


MASQUE DE PROTECTION FFP



MISE EN PLACE DU MASQUE

- **Se laver les mains** à l'eau et au savon ou se frictionner avec un gel hydro alcoolique.
- Mettre des gants si l'activité le nécessite (soins...)
- Placer le masque sur le visage.
- Tenir le masque et passer les élastiques derrière la tête sans les croiser, une attache au-dessus de l'oreille, l'autre en dessous.
- **Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez.**
- Vérifier que le masque soit en bonne position. Pour cela, il convient de contrôler l'étanchéité :
 - Inspirer : le masque doit s'écraser légèrement sur le visage, si le masque ne se plaque pas, c'est qu'il n'est pas étanche et qu'il faut le réajuster.
 - Après plusieurs tentatives infructueuses, changer de modèle car il est inadapté.
- Une fois ajusté, **ne plus toucher le masque avec les mains.**
- Un masque FFP retiré, souillé ou humide ne doit pas être réutilisé.
- La durée de port doit être conforme à la notice d'utilisation (8h maximum).

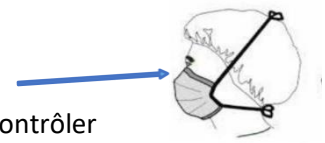

Une barbe (même naissante) réduit l'étanchéité du masque au visage et diminue son efficacité globale. Un masque FFP mal adapté ou mal ajusté ne protège pas plus qu'un masque chirurgical.



RETRAIT D'UN MASQUE

- Retirer les gants.
- Se laver les mains à l'eau et au savon ou se frictionner avec un gel hydro alcoolique.
- Retirer le masque en saisissant par l'arrière les lanières ou les élastiques sans toucher la partie avant du masque.
- Les masques à usage unique doivent être jetés immédiatement après chaque utilisation dans une poubelle dédiée (munie d'un sac plastique, de préférence avec couvercle et à commande non manuelle).
- Se laver les mains ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique après retrait.

POUR PROTÉGER, LE MASQUE DOIT ENGLOBER LE NEZ, LA BOUCHE ET LE MENTON

